

Gebruiksaanwijzing kroon- en/of brug

Dit product is in opdracht van uw tandarts gemaakt bij een erkend tandtechnisch laboratorium.

Het tandtechnisch laboratorium heeft dit Nederlands kwaliteitsproduct speciaal voor u op maat vervaardigd. Dit product voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Europees Besluit Medische Hulpmiddelen.

Om zo lang mogelijk van uw tandvervangende voorziening en uw gezondheid te genieten, is onderhoud noodzakelijk.

Leest u daarom deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw tandarts voor advies.

Hoe onderhoudt u uw kroon en/of uw brug het best?

Poets uw gebit na iedere maaltijd zorgvuldig met een tandenborstel en tandpasta en spoel na met water.

Monddouche, tandfloss, wiggen en speciale reinigingsborsteltjes (ragertjes) voor het reinigen tussen uw kroon en/of brug zijn onmisbaar voor een goede hygiëne. Vraag uw tandarts om instructies.

Wanneer uw mondsituatie verandert door bijvoorbeeld tandverlies, kan dit gevolgen hebben voor uw kroon en/of brug. Raadpleeg uw tandarts voor behoud van een ideale situatie.

Tandvleesontstekingen en/of tandsteen-aanslag kunnen leiden tot verlies van de natuurlijke elementen en ook van uw kroon en/of brug. Raadpleeg bij twijfel uw tandarts.

Ga minstens éénmaal, liefst elk half jaar voor controle naar uw tandarts.

Uw voordelen bij goed onderhoud:

- Het is hygiënischer. Dus u heeft minder kans op ontstekingen in de mond.
- Langere levensduur van uw kroon en/of brug.
- Uw tanden blijven mooi en goed functioneren.



Poetsen



Ragen

Flossen

