

Gebruiksaanwijzing gebitsprothese

Dit product is in opdracht van uw tandarts gemaakt door een erkend tandtechnisch laboratorium.

Het tandtechnisch laboratorium heeft dit Nederlands kwaliteitsproduct speciaal voor u op maat vervaardigd. Dit product voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Europees Besluit Medische Hulpmiddelen.

Om zo lang mogelijk van uw tandvervangende voorziening en uw gezondheid te genieten, is onderhoud noodzakelijk.

Leest u daarom deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw tandarts voor advies.

Hoe onderhoudt u uw gebitsprothese het best?




Na iedere maaltijd de mond en de gebitsprothese spoelen met water.

Minstens één keer per dag uw gebitsprothese poetsen met een tandenborstel met een niet agressieve gebitsprothesereiniger. Beter nog is het om na elke maaltijd uw gebitsprothese te poetsen.



Is uw gebitsprothese voorzien van een zachte voering?

U reinigt de gebitsprothese dan met een daarvoor bestemd middel. Uw tandarts kan u hierover adviseren.

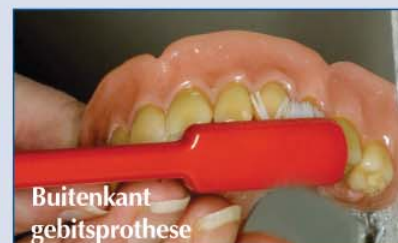

Het tandvlees dat in contact staat met de gebitsprothese en de ruimte tussen de tanden zorgvuldig borstelen. Doe dat met een zachte tandenborstel en tandpasta. Na de reinigingsbeurt uw gebitsprothese goed afspoelen onder stromend water.

Wanneer u uw gebitsprothese niet draagt kunt u deze het beste bewaren in een met water gevuld gebitsprothese doosje.



Leg de gebitsprothese nooit in water warmer dan 40° C en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.

Vraag uw tandarts wanneer de volgende controle van uw gebitsprothese nodig is.

Uw voordelen bij goed onderhoud:

- Het is hygiënischer. Dus u heeft minder kans op ontstekingen in de mond.
- Uw gebitsprothese blijft mooi en blijft langer goed functioneren.
- Uw gebitsprothese blijft beter passen.